

**GlucoMen<sup>®</sup>**  
*areo* **GK**

(EN) (IR)

**A. MENARINI DIAGNOSTICS LTD**  
405 Wharfedale Road  
Wokingham - Berkshire RG41 5RA  
Tel. +44-1189-444100  
GlucoMen<sup>®</sup> Careline:  
(UK) 0800 243667  
(Republic of Ireland) 1800 709903  
(Northern Ireland) 0800 7837286  
Email: myglucomen@menarinidiag.co.uk  
www.glucomen.co.uk

(DE)

**A. MENARINI DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND**  
Division der BERLIN-CHEMIE AG  
Glienicke Weg 125  
D-12489 Berlin  
Tel. 0800-45 82 66 36 (kostenlos)  
E-Mail: glucomen@berlin-chemie.de  
Internet: www.glucomenareo.de

(SE) (NO) (DK) (FI)

**A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.**  
Italien filial (Sverige)  
Medeon Science Park  
Per Albin Hanssons Väg 41  
205 12 Malmö - Sverige  
Tel. +46-(0)40-321270

**GlucoMen<sup>®</sup>**  
*areo* **GK**

mmol/L

- (EN) Quick guide
- (DE) Kurzanleitung
- (SE) Snabbguide
- (NO) Hurtigguide
- (DK) Kvikguide
- (FI) Pikaohje






1

- (EN) Wash and dry hands thoroughly.
- (DE) Hände gründlich waschen und trocknen.
- (SE) Tvätta och torka händerna noga.
- (NO) Vask og tørk hendene nøye.
- (DK) Vask og tør dine hænder grundigt.
- (FI) Pese ja kuivaa kädet huolellisesti.



2

- (EN) Insert a test strip fully into the meter.
- (DE) Einen Teststreifen vollständig in das Messgerät einführen.
- (SE) För in en teststicka helt in i mätaren.
- (NO) Før teststrimmelen helt inn i måleren.
- (DK) Sæt teststrimlen helt ind i måleren.
- (FI) Työnnä testiliuska kokonaan mittariin.

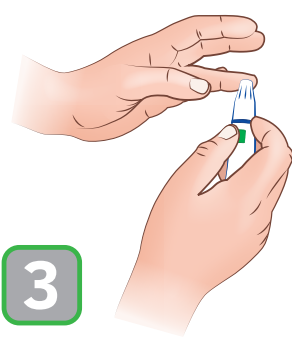

3


- (EN) Prick your finger.
- (DE) Stechen Sie in Ihren Finger.
- (SE) Stick dig i fingret.
- (NO) Stikk i fingeren din.
- (DK) Prik din finger.
- (FI) Pistä sormeen.



4

- (EN) Apply the blood to the end of the test strip.
- (DE) Das Blut auf das Ende des Teststreifens auftragen.
- (SE) Applicera bloddroppen i änden av teststickan.
- (NO) Påfør blodet på enden av teststrimmelen.
- (DK) Påfør blodet på enden af teststrimlen.
- (FI) Ota vähän verta testiliuskan päähän.

5

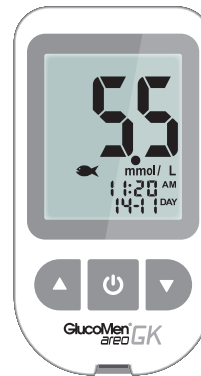

**GlucoMen<sup>®</sup>**  
**areo GK**

- (EN) The result is displayed in just 5 seconds.
- (DE) Das Ergebnis wird nach nur 5 Sekunden angezeigt.
- (SE) Resultatet visas efter bara 5 sekunder.
- (NO) Resultatene vil vises etter bare 5 sekunder.
- (DK) Resultatet vises på kun 5 sekunder.
- (FI) Tulos näkyy näytöllä viiden sekunnin kuluttua.

**A.MENARINI**  
**diagnostics**